



CÓMO EMPEZAR

Versiónes de la aplicación: Content Manager 2.x, Patient Selection 4.x

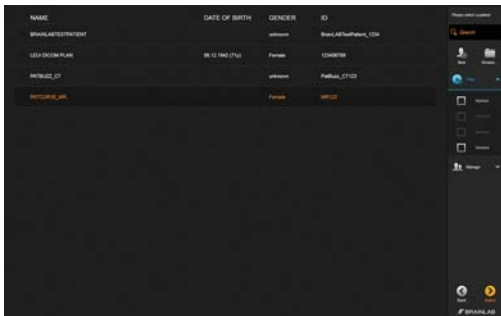


INICIAR LA APLICACIÓN

- Inicie la sesión en su equipo.
Se abre la lista de los pacientes.

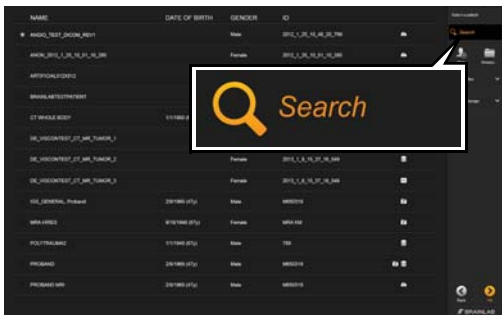

BUSCAR UN PACIENTE


- Introduzca el nombre del paciente u otra información identificativa en el campo de búsqueda.
- Es posible que aparezcan iconos para indicar la ubicación de almacenamiento.

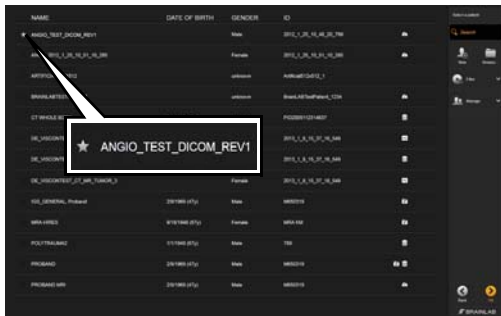

CARGAR DATOS DE PACIENTE CON ANTELACIÓN

- Pulse la estrella situada cerca del nombre del paciente para verlo más adelante.
Los datos de paciente se cargarán en el sistema con antelación.


NOTA: El paciente sigue marcado hasta que se cierre la sesión.

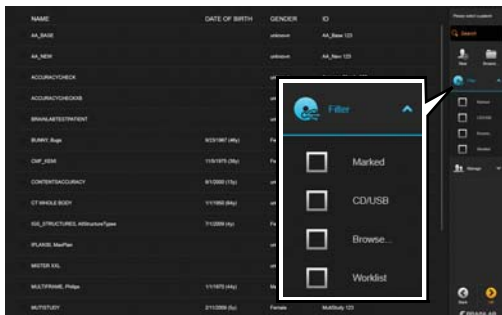

FILTRAR UBICACIONES DE ALMACENAMIENTO


- Seleccione una casilla para buscar las opciones disponibles de almacenamiento de datos:
 - **Marked:** Pacientes seleccionados previamente en la sesión actual.
 - **CD/USB:** Datos almacenados en USB/CD introducido.
 - **Browse...:** Elegir datos de su sistema de ficheros.
 - **Worklist:** Solo pacientes de la lista de trabajo del equipo.

NOTA: Es posible que la lista del filtro varíe en función de la configuración del equipo y del sistema.

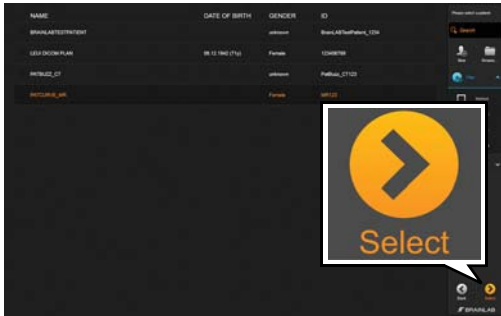

SELECCIONAR EL PACIENTE

- Seleccione el paciente deseado de la lista de pacientes.
Se resaltará el nombre del paciente.
- Pulse **Select**.
Se cargan los datos del paciente.

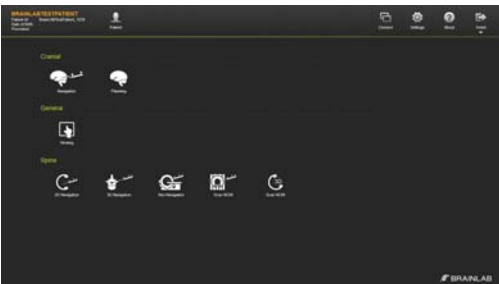

SELECCIONAR UN PROCEDIMIENTO

- Seleccionar un icono de procedimiento
 - Si hay procedimientos preestablecidos instalados en su sistema, se abre una pantalla de selección.
 - Si solo hay un procedimiento disponible, este se selecciona automáticamente.




SELECCIONAR LA CLASIFICACIÓN DE ENFERMEDADES

En función del procedimiento, es posible que se le solicite que seleccione una clasificación de enfermedades.

- Seleccione el área del cuerpo ①.
- Seleccione el sistema o aparato ②.
- Seleccione el tipo de enfermedad ③.
- Seleccione la categoría ④.
- Opcional: Elija la enfermedad correspondiente ⑤.
- Seleccione **Done**.

SELECCIÓN DATOS PACIENTE


Versiones de la aplicación: Content Manager 2.x, Patient Selection 4.x

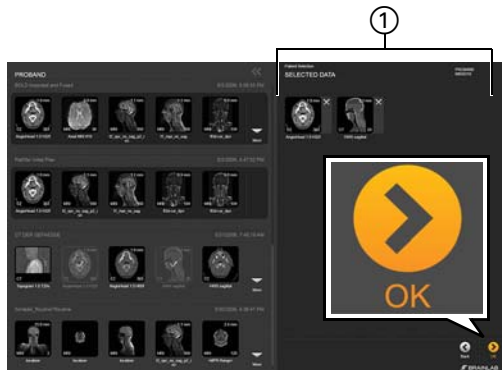

CARGAR UN ESTUDIO PARA VISUALIZARLO

Un estudio (imágenes individuales con un borde gris claro) contiene imágenes DICOM procedentes de equipos de adquisición de imágenes.


- Seleccione las imágenes individuales deseadas de la izquierda. Las imágenes aparecerán en **Selected Data** ①.
- Pulse **OK**.

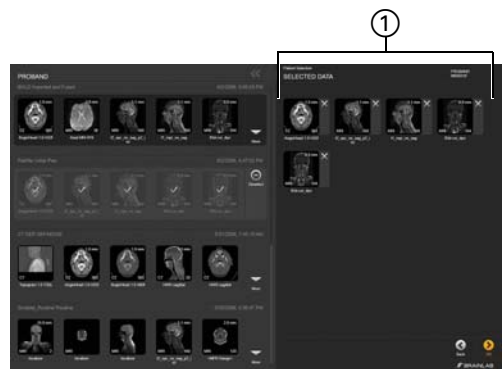

CARGAR UN PLAN PARA VISUALIZARLO

Un plan (con un borde gris oscuro) incluye imágenes preparadas o planificadas con el software de Brainlab.

- Seleccione una imagen de la izquierda con un borde gris oscuro. Todas las imágenes del plan se visualizan en **Selected Data** ①.
- Pulse **OK**.

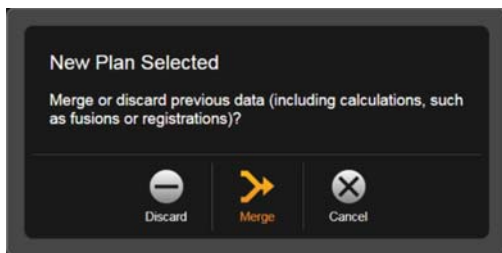

CUADRO DE DIÁLOGO PLAN MERGE

Si se seleccionan datos (p. ej. objetos o fusiones) y, a continuación, un plan, se abre el cuadro de diálogo.

- Seleccione **Merge** para sobrescribir y agregar contenido que falta.
- Seleccione **Discard** para continuar únicamente con el contenido del plan.
- Seleccione **Cancel** para mantener los datos seleccionados previamente y no agregar el plan seleccionado recientemente.




DESACTIVAR IMÁGENES

- Desactive todas las imágenes de un plan pulsando **Deselect**.
- También puede desactivar imágenes individuales pulsando la **X** situada junto a la imagen.

Las imágenes desactivadas no están disponibles para aplicaciones de software.


AGREGAR NUEVOS PACIENTES

Versión de la aplicación: Content Manager 2.x, Patient Selection 4.x

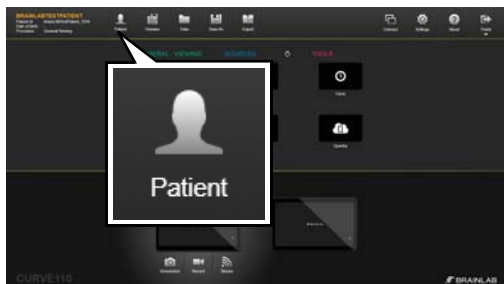

VISUALIZAR POR LA LISTA DE LOS PACIENTES

- Seleccione **Patient** de la pantalla principal **Content Manager** o de la página de selección de procedimientos.
Se abre la lista de los pacientes.

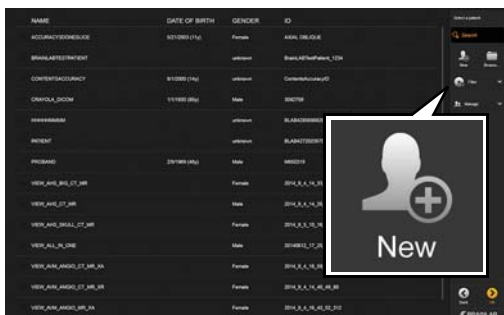

AGREGAR EL PACIENTE

- Seleccione la opción **New** del menú.



GUARDAR EL PACIENTE

- Introduzca el nombre del paciente, la fecha de nacimiento, el sexo y el identificador.
- Seleccione la opción **Done**.
La aplicación guarda el nuevo paciente y lo selecciona.

GUARDAR, EXPORTAR Y SALIR

Versiones de la aplicación: Content Manager 2.x, Patient Selection 4.x



GUARDAR UN PLAN

- Tras realizar cambios en los datos de paciente, seleccione **Save** o **Save as** en la pantalla principal **Content Manager**.
Se abre el cuadro de diálogo **Save as Plan** ① .
- Si desea editar el nombre, selecciónelo ②.
- Seleccione **Save As** ③.

NOTA: La disponibilidad de la función Guardar depende del procedimiento.




EXPORTACIÓN DE DATOS, PASO 1

- Seleccione la opción **Export** de la pantalla principal.



EXPORTACIÓN DE DATOS, PASO 2


- Seleccione los datos que desea exportar.
Solo se exportarán los conjuntos de datos con borde naranja.
- Pulse el botón **Export**, que está situado en la parte inferior de la pantalla.

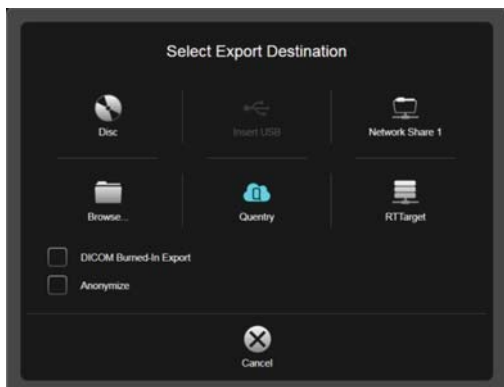

OPCIONES, GUARDAR DATOS EXPORTADOS

- Almacenamiento en **CD/DVD**
- Almacenamiento en **USB**
- Carpeta preestablecida en la red
- **Browse...:** Seleccionar una carpeta en Windows
- Cargar a una cuenta **Qentry**
- Guardar conjuntos DICOM **Burned-In** en su disco duro.
- Espacio DICOM RT de la red


NOTA: Es posible que haya otros destinos adicionales disponibles en función de la configuración del sistema.

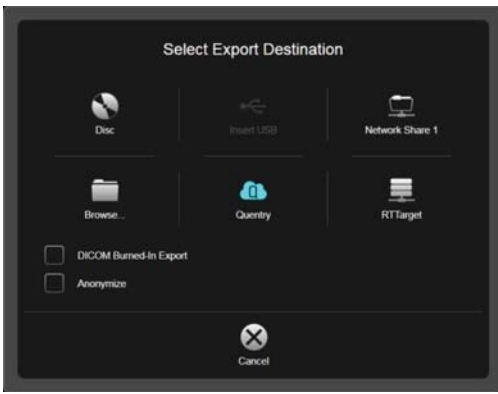

EXPORTAR ELEMENTOS PLANIFICADOS

El contenido creado con el software de planificación de Brainlab mantiene su formato original tras la exportación. Por ejemplo, los datos DICOM siguen siendo DICOM, y los datos Brainlab Advanced File siguen siendo Brainlab Advanced File.

NOTA: Si desea cambiar los ajustes preestablecidos de modo que el contenido sea convertido a otro formato durante la exportación, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

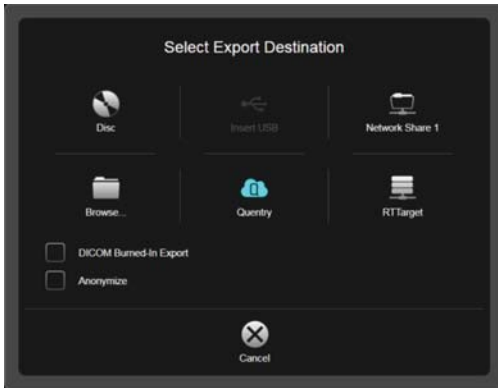

CASILLAS EXPORT

- **DICOM Burned-In Export:** Integra de forma permanente los contornos de un objeto segmentado en una serie de imágenes DICOM MR.

NOTA: No es posible acceder posteriormente a las estructuras situadas debajo del contorno **Burned-In**. Utilice siempre las series de imágenes **Burned-In** junto con las series de imágenes RM originales.


- Elija **Anonymize** para anonimizar los datos exportados.

NOTA: Los datos guardados en el sistema local permanecen invariables.




SALIR DEL SOFTWARE

- Seleccione la opción **Finish** de la pantalla principal.
- Al pulsar **Finish**, se abre un menú desplegable que permite:
 - Cambiar el procedimiento o
 - Abra las opciones **Finish** (dependen del sistema).

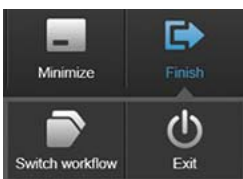

OPCIONES FINISH

- **New treatment:** Finaliza la sesión del usuario actual y abre un tratamiento nuevo.
- **Restart:** Reinicia el sistema.
- **Shut down:** Apaga el sistema.
- **Exit:** Cierra **Content Manager**.

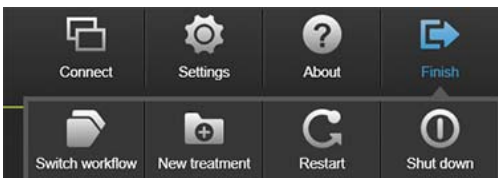

COPYRIGHT:

Este manual contiene información protegida por derechos de autor. Ninguna de sus partes puede ser reproducida o traducida sin la autorización escrita de Brainlab.

RESPONSABILIDAD:

Esta guía está sujeta a cambios sin previo aviso y no implica la aceptación de ningún tipo de responsabilidad por parte de Brainlab.

Más información en las "Limitaciones de responsabilidad" de las Condiciones de Venta de Brainlab.

