

CURVE-JÄRJESTELMÄN ASETUKSET

Laitteisto: Curve 1.2



LEIKKAUSSALIN ASETUKSET

- Sijoita **kamerakärri** 1,2–1,8 m pois työskentelyalueelta.

HUOMAUTUS: älä sijoita mitään **kamera** ①- tai **monitorikärriä** ② suoraan potilaan yläpuolelle.



KAMERAKÄRRYN LIITTÄMINEN MONITORIKÄRRYYN


- Kytke Brainlabin kamerakaapeli **kamerakärrien** pohjaan ja kytke se **monitorikärryn** takapaneeliin.
- Vedä varoen liittimestä varmistaaksesi, että se on lukittu.
- Kytke virtakaapeli seinäpistorasiaan (ei esitetty kuvassa).

HUOMAUTUS: EM-seurantayksikön liitintää koskevat tiedot ovat vastaavassa järjestelmän käyttöohjeessa.



VIRRAN KYTKEMINEN CURVE-JÄRJESTELMÄÄN

- Kytke **monitorikärryn** ① käyttöpaneelin päävirtakytkin päälle.

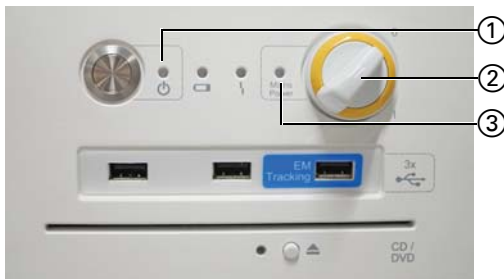


VIRRAN KATKAISEMINEN CURVE-JÄRJESTELMÄSTÄ

- Poistu ohjelmistosta ja odota, kunnes virran LED-merkkivalo ① sammuu.
- Kytke päävirtakytkin ② pois päältä ja odota, kunnes virran LED-merkkivalo ③ sammuu.

HUOMAUTUS: odota, että järjestelmä sammuu täysin ennen päävirtakytkimen kytkemistä pois päältä.

HUOMAUTUS: odota **Curven** sammuttamisen jälkeen vähintään 60 sekuntia ennen sen uudelleenkäynnistämistä.

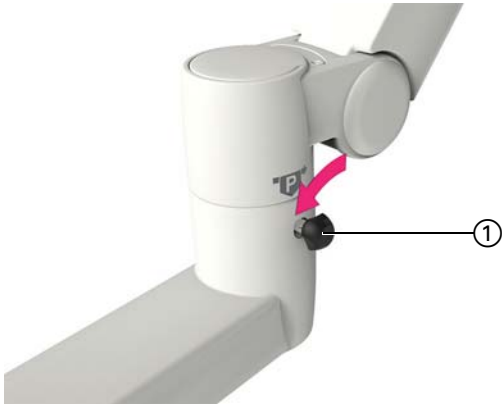

MONITORIN ASENNON LUKITSEMINEN JA LUKITUKSEN AVAAMINEN


- Lukitse jokainen nivel kiristämällä lukitusnuppia ①, jotta monitori ei liiku kosketettaessa.
- Voit avata lukituksen löysäämällä lukitusnuppia ①, kunnes nivel liikkuu vaivattomasti.



KAMERAN MANUAALINEN SÄÄTÄMINEN

- Paina kameran kahvan takana olevaa laserliipaisinta kohdistuslaserin aktivoimiseksi.
- Sijoita kamera lasersäteen avulla siten, että työskentelyalue on kameran kuvausalan keskellä.

HUOMAUTUS: instrumenttien on oltava kameran kuvausalalla, jotta niitä voi seurata.

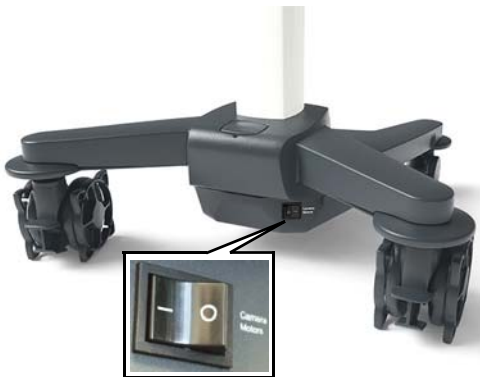


KAMERAN SÄÄTÄMINEN OHJAIMILLA

- Varmista, että kameran moottorin käynnistyskytkin on päällä.
- Säädä kameraa ohjelmiston ohjaimilla. Kameran liikkeessä kuuluu äänimerkki.

TELAKOINTI JA KULJETUS

Laitteisto: Curve 1.2

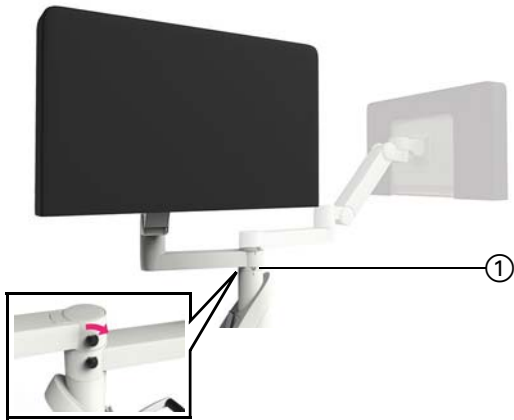

MONITORIKÄRRYN SJOITTAMINEN: VAIHE 1


- Aseta suojukset paikalleen monitoreihin ja kameraan.
- Löysää kaikki lukitusnupit.
- Kierrä alavartta ilmoitettuun asentoon, kunnes pysäköintisymbolit ovat kohdakkain ①.
- Kiristä lukitusnuppia (esitetään näkymä toiselta puolelta).

HUOMAUTUS: ylävarsi on ehkä siirrettävä pois alavarren tieltä.



MONITORIKÄRRYN SJOITTAMINEN: VAIHE 2

- Nosta alavartta mahdollisimman ylös.
- Kierrä alavarren sisäniveltä, kunnes pysäköintisymbolit ovat kohdakkain.
- Kiristä lukitusnuppi.

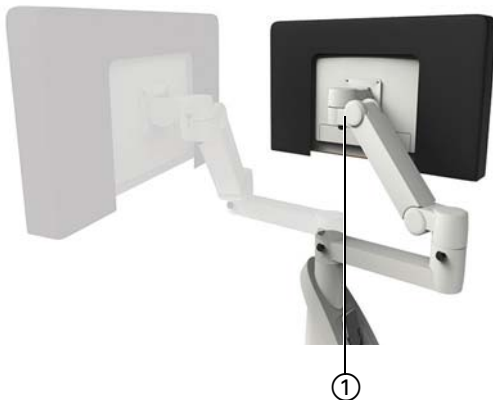

MONITORIKÄRRYN SJOITTAMINEN: VAIHE 3

- Kierrä monitorin niveltä ①, kunnes pysäköintisymbolit ovat kohdakkain.
- Kiristä lukitusnuppi.




MONITORIKÄRRYN SJOITTAMINEN: VAIHE 4

- Toista vaiheita 1 ja 2 ylävarren kohdalla, kunnes **monitorikärry** on lopullisessa asemassaan.



KAMERAKÄRRYN SJOITTAMINEN: VAIHE 1

- Paikanna pysäköintisymboli kameras pylväässä. Kameraa on ehkä nostettava pysäköintisymbolin näkemiseksi.
- Voit siirtää pylvään pysäköintiasemaan painamalla teleskooppipylvään kahvan painiketta.

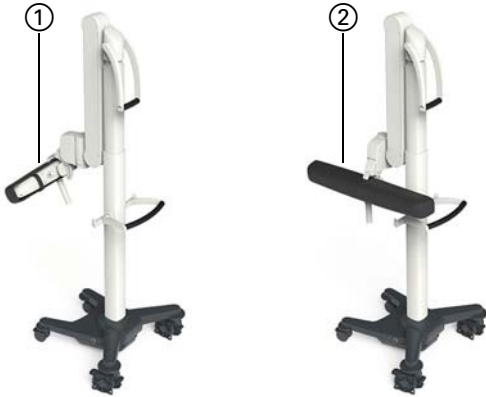


KAMERAKÄRRYN SJOITTAMINEN: VAIHE 2

- Taita kameras vartta alaspäin yhdessä kameras kahvan kanssa, kunnes se on tiukasti kohdakkain pylvään ① kanssa.
- Kierrä kameraa sivulle yhdessä kameras kahvan kanssa ②.



KAMERAKÄRRYN SJOITTAMINEN: VAIHE 3

- Kiinnitä kamera pylvääseen suojakannen tarranauhalla.

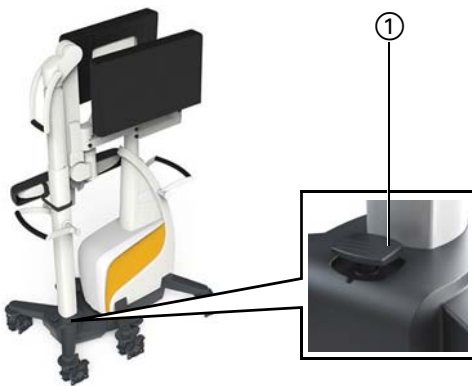

CURVEN TELAKOINTI JA TELAKOINNISTA IRROTTAMINEN

- Kun **monitorikärry** ja **kamerakärry** on sijoitettu telakointia varten, kytke päälle **monitorikärryn** jarrut.
- Työnnä telakointipoljin alas, jos se ponnahti ylös ①.
- Työnnä **kamerakärryä** nopeasti **monitorikärryn**, kunnes telakointipoljin ponnahtaa ylös ①.

Voit irrottaa telakoinnin työntämällä telakointipolkimen alas ja vetämällä sen irralleen.

