

NASTAVENIE SYSTÉMU CURVE

Hardvér: Curve 1.2



ROZLOŽENIE OPERAČNEJ SÁLY

- **Vozík kamery** umiestnite do vzdialenosti 1,2 - 1,8 m od operačného poľa.

POZNÁMKA: Žiadnu časť **vozíka kamery** ① a **vozíka monitora** ② neumiestňujte priamo nad pacienta.



PRIPOJENIE VOZÍKA KAMERY K VOZÍKU MONITORA

- Zapojte kábel kamery spoločnosti Brainlab do základne **vozíka kamery** a pripojte ho k zadnému panelu **vozíka monitora**.
- Jemne potiahnite pri konektore, aby ste sa uistili, že je uzamknutý.
- Zapojte sieťový napájací kábel do sieťovej zásuvky (nie je zobrazená).

POZNÁMKA: Informácie o pripojení zameriavacej jednotky EM nájdete v príslušnej príručke používateľa systému.



ZAPNUTIE SYSTÉMU CURVE

- Zapnite sieťový vypínač na používateľskom paneli **vozíka monitora** ①.




VYPNUTIE SYSTÉMU CURVE

- Ukončíte softvér a počkajte, kým LED napájania ① nezhasne.
- Vypnite sieťový vypínač ② a počkajte, kým LED sieťového napájania ③ nezhasne.

POZNÁMKA: Pred vypnutím sieťového vypínača počkajte na úplné vypnutie systému.

POZNÁMKA: Pred opätovným zapnutím po vypnutí systému **Curve** počkajte aspoň 60 sekúnd.

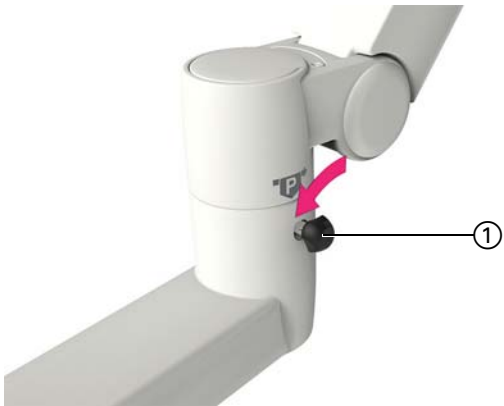

UZAMKNUTIE A ODOMKNUTIE POLOHY MONITORA

- Uzamknite každý kĺb utiahnutím aretačného gombíka ① tak, aby sa monitor pri dotyku nepohol.
- Na odomknutie uvoľňte aretačný gombík ①, až kým sa kĺb nepohybuje ľahko.



MANUÁLNE NASTAVENIE KAMERY

- Stlačte laserové tlačidlo na zadnej strane rukoväte kamery, čím aktivujete polohovací laser.
- Kameru umiestnite pomocou laserového lúča tak, aby bolo operačné pole v strede zorného poľa kamery.

POZNÁMKA: Aby bolo možné nástroje sledovať, musia byť v zornom poli kamery.




NASTAVENIE KAMERY POMOCOU OVLÁDACÍCH PRVKOV

- Uistite sa, že je spínač motora kamery zapnutý.
- Na nastavenie kamery použite ovládacie prvky v softvéri. Počas pohybu kamery počuť pípanie.

DOKOVANIE A PREPRAVA


Hardvér: Curve 1.2

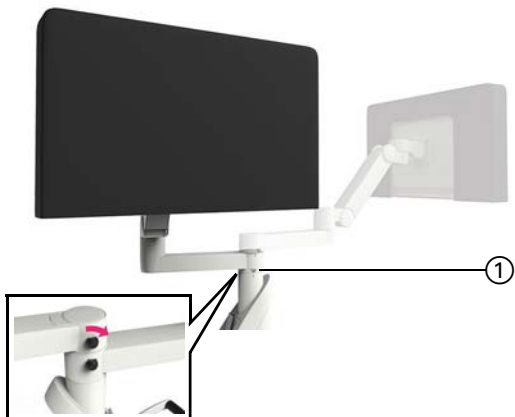

NASTAVENIE POLOHY VOZÍKA MONITORA: KROK 1


- Na monitory a kameru umiestnite ochranné kryty.
- Uvoľnite všetky aretačné gombíky.
- Otáčajte dolné rameno do uvedenej polohy, až kým sa nezarovnajú parkovacie symboly ①.
- Uťahnite aretačný gombík (zväčšený detail ukazuje pohľad z druhej strany).

POZNÁMKA: Možno budete musieť odsunúť horné rameno z dráhy dolného ramena.

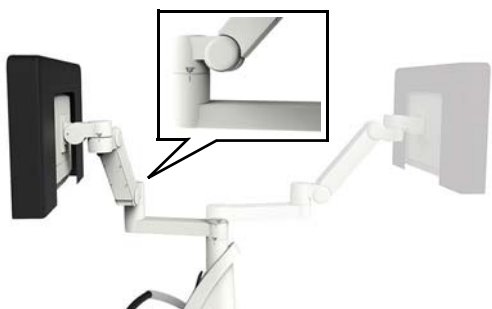

NASTAVENIE POLOHY VOZÍKA MONITORA: KROK 2

- Zdvihnite dolné rameno čo najvyššie.
- Otáčajte vnútorný kĺb dolného ramena, až kým sa parkovacie symboly nezarovnajú.
- Uťahnite aretačný gombík.

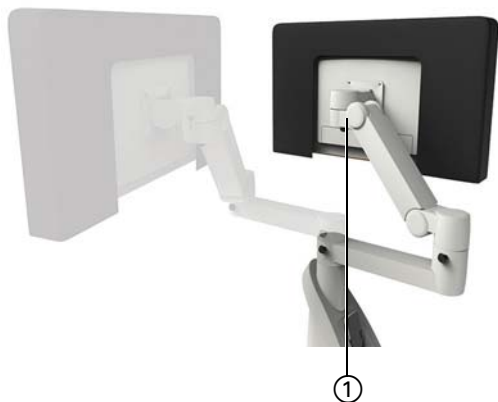

NASTAVENIE POLOHY VOZÍKA MONITORA: KROK 3

- Otáčajte kĺb monitora ①, až kým sa parkovacie symboly nezarovnajú.
- Uťahnite aretačný gombík.




NASTAVENIE POLOHY VOZÍKA MONITORA: KROK 4

- Opakujte kroky 1 a 2 pre horné rameno, až kým sa vozík monitora nedostane do svojej konečnej polohy.



NASTAVENIE POLOHY VOZÍKA KAMERY: KROK 1

- Nájdite parkovací symbol na tyči kamery. Možno budete musieť zdvihnúť kameru, aby ste uvideli parkovací symbol.
- Stlačte tlačidlo na rukoväti teleskopickéj tyče, aby ste tyč mohli posunúť do parkovacej polohy.

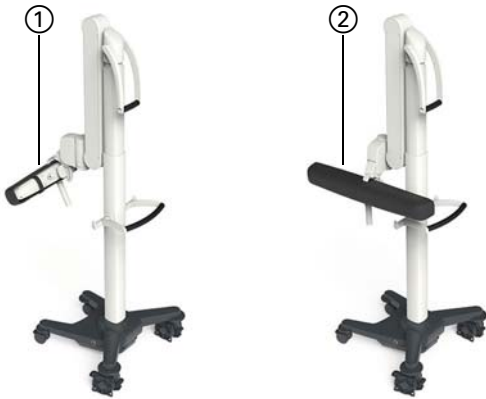


NASTAVENIE POLOHY VOZÍKA KAMERY: KROK 2

- Pomocou rukoväte kamery skladajte dolu rameno kamery, až kým sa pevne nezarovná s tyčou ①.
- Pomocou rukoväte kamery otočte kameru nabok ②.



NASTAVENIE POLOHY VOZÍKA KAMERY: KROK 3

- Pripevnite kameru k tyči pomocou suchého zipsu ochranného krytu.

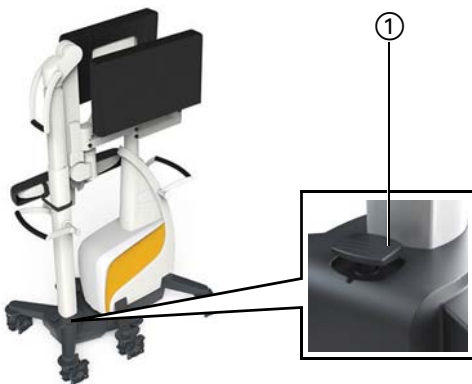

DOKOVANIE A UVOĽNENIE DOKOVANIA SYSTÉMU CURVE

- Po nastavení polohy **vozíka monitora** a **vozíka kamery** na dokovanie zablokujte brzdy na **vozíku monitora**.
- Ak je dokovací pedál zdvihnutý, stlačte ho dolu ①.
- Rýchlo potlačte **vozik kamery** do **vozíka monitora**, kým sa dokovací pedál nezdvihne ①.

Na uvoľnenie dokovania stlačte dokovací pedál a zariadenia od seba odtiahnite.

AUTORSKÉ PRÁVA:

Táto príručka obsahuje informácie chránené zákonom o autorských právach. Bez jednoznačného písomného povolenia spoločnosti Brainlab sa nesmie reprodukovat' alebo prekladať žiadna časť tejto príručky.

Revízia dokumentu: 1.0

Výrobok č. 60917-35SK

ZÁRUKA:

Táto príručka podlieha zmenám bez oznámenia a nepredstavuje záväzok zo strany spoločnosti Brainlab.

Ďalšie informácie získate v časti „Obmedzenia záruky“ v príručke Všeobecné platnosti a podmienky predaja spoločnosti Brainlab.

