

OPSÆTNING CURVE-SYSTEMET


Hardware: Curve 1.2



OPSÆTNING AF OPERATIONSSTUE

- Placér **Kameravogn** 1,2-1,8 m væk fra operationsområdet.

BEMÆRK: Placér ikke en del af **Kamera** ① og **Monitorvogn** ② direkte over patienten.

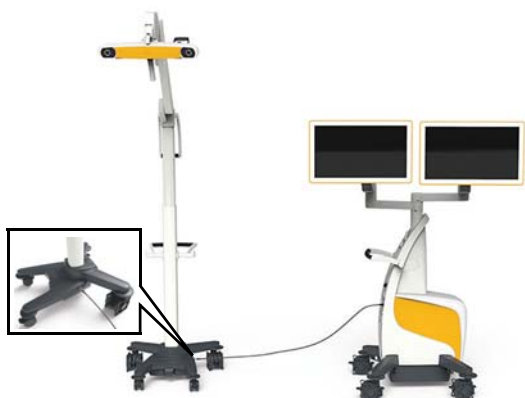

TILSLUT KAMERAVOGN TIL MONITORVOGN

- Sæt Brainlabs kamerakabel ind i bunden af **Kameravogn** og tilslut til bagpanelet i **Monitorvogn**.
- Hiv forsigtigt i stikket for at bekræfte, at det er låst.
- Sæt strømforsyningskablet i stikkontakten (ikke vist).

BEMÆRK: For oplysninger om tilslutning af EM-sporingsenhed se den tilsvarende Systembrugervejledning.



TÆND FOR CURVE-SYSTEMET

- Tænd for kontakten til elnettet på brugerpanelet i **Monitorvogn** ①.




SLUK FOR CURVE-SYSTEMET

- Gå ud af softwaren, og vent til LED ① slukker.
- Sluk for elnettets strømkontakt ②, og vent til elnettets LED ③ slukker.

BEMÆRK: Vent på, at systemet lukker helt ned, før du slukker elnettets hovedkontakt.

BEMÆRK: Efter **Curve** lukkes ned, skal du vente mindst 60 sekunder, før det tændes igen.

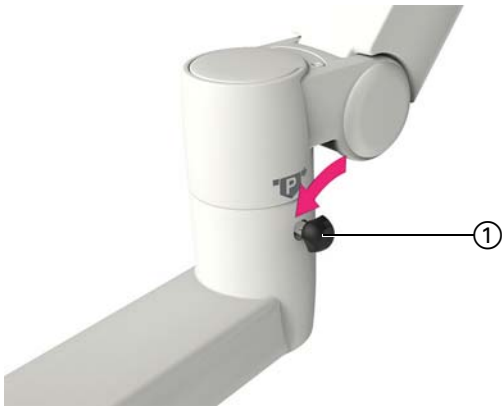

LÅS OG LÅS OP FOR MONITORPOSITION


- Lås hvert led ved at stramme låseknappen ①, sådan at monitoren ikke bevæger sig, når den berøres.
- For at låse op løsnes låseknapp ①, indtil leddet nemt bevæger sig.



JUSTÉR KAMERA MANUELT

- Tryk på laserknappen bag på kamerahåndtaget for at aktivere positioneringslaseren.
- Flyt kameraet vha. laserstrålen, således at arbejdsområdet er midt i kameraets synsfelt.

BEMÆRK: Instrumenterne kan ikke spores, hvis de ikke er i kameraets synsfelt.

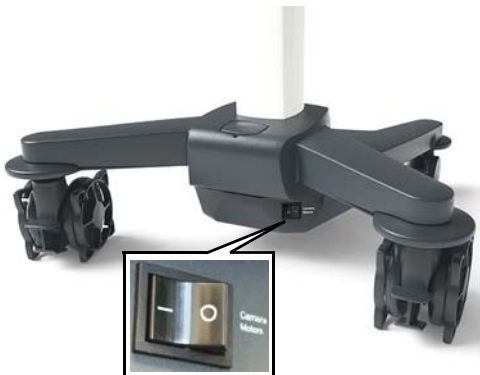


JUSTER KAMERA MED BETJENINGSELEMENTER

- Sørg for, at kameraets motorkontakt er tændt.
- Brug betjeningselementerne i softwaren til at justere kameraet. Et bip høres, når kameraet bevæger sig.

FORANKRING OG TRANSPORT


Hardware: Curve 1.2

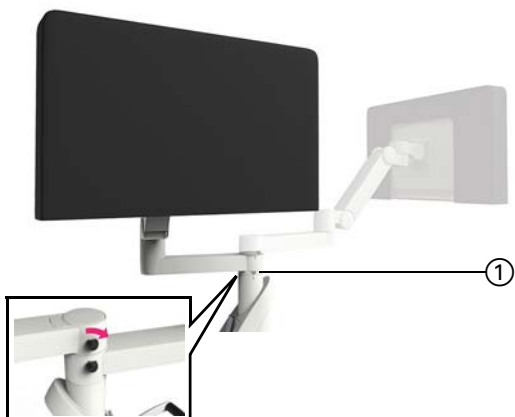

PLACER MONITORVOGN: TRIN 1


- Sæt beskyttelsesafdækninger på monitorer og kamera.
- Løsn alle låseknapper.
- Rotér den sænkede arm til den angivne position, indtil park-symbolerne afstemmes ①.
- Stram låseknappen (tillæg viser, hvordan det ser ud fra den anden side).

BEMÆRK: Det er måske nødvendigt at flytte den øverste arm væk fra den sænkede arm.

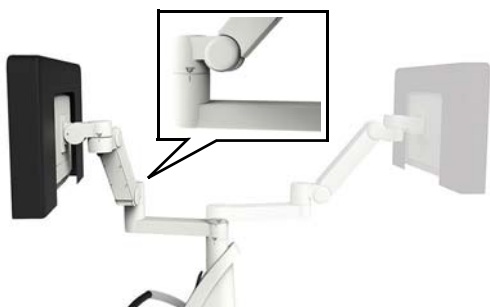

PLACER MONITORVOGN: TRIN 2

- Løft den sænkede arm så højt op som muligt.
- Rotér det indre led på den sænkede arm, indtil park-symbolerne afstemmes.
- Stram låseknappen.

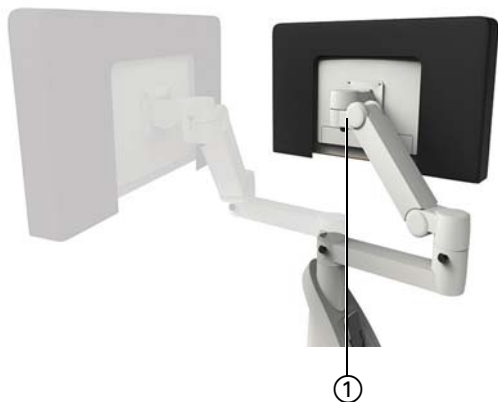

PLACER MONITORVOGN: TRIN 3

- Rotér monitorleddet ①, indtil park-symbolerne afstemmes.
- Stram låseknappen.



PLACER MONITORVOGN: TRIN 4

- Gentag Trin 1 og 2 for den øverste arm, indtil **Monitorvogn** befinder sig i den endelige position.



PLACER KAMERAVOGN: TRIN 1

- Find park-symbolet på kamerapælen. Du skal måske løfte kameraet for at se park-symbolet.
- Tryk på knappen på teleskopets håndtag på pælen for at flytte pælen ind i park-position.




PLACER KAMERAVOGN: TRIN 2

- Fold kameraets arm ned med kamerahåndtaget, indtil den er afstemt med pælen ①.
- Rotér kameraet til siden med kamerahåndtaget ②.



PLACER KAMERAVOGN: TRIN 3

- Fastgør kameraet til pælen med beskyttelsesremmen med velcro.

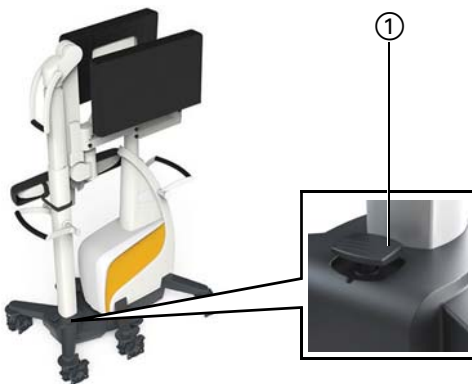

FORANKR OG LØSN CURVE

- Efter positionering af **Monitorvogn** og **Kameravogn** til forankring aktiveres **Monitorvogn**-bremserne.
- Skub forankringspedalen ned, hvis den skubbes op ①.
- Skub **Kameravogn** ind i **Monitorvogn** hurtigt, indtil forankringspedalen skubbes op ①.

For at løse skubber man forankringspedalen ned og trækker den fra hinanden.

OPHAVSRET:

Denne vejledning indeholder oplysninger, der er beskyttet af ophavsret. Ingen del af denne vejledning må gengives eller oversættes uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Brainlab.

Dokumentrevision: 1.0

Artikelnummer: 60917-35DA

ANSVAR:

Denne vejledning kan ændres uden varsel og udgør ikke nogen forpligtelse for Brainlab.

Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Ansvarsbegrænsning" i Brainlabs generelle salgsbetingelser.

