

# OPSTELLING CURVE-SYSTEEM


Hardware: Curve 1.2



## OPSTELLING IN DE OK

- Plaats de **camerakar** op een afstand van 1,2 tot 1,8 m van het operatieveld.

**OPMERKING.** Plaats geen enkel deel van de **camera** ① en **monitorkar** ② direct boven de patiënt.

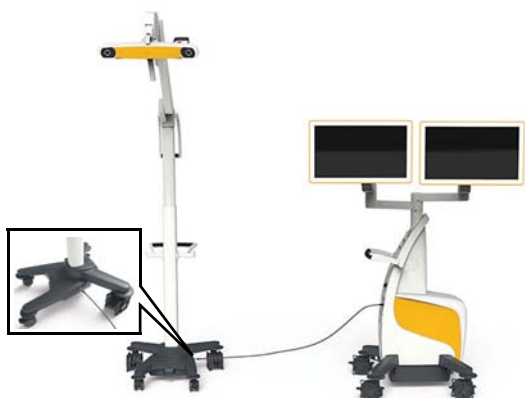

## CAMERAKAR AANSLUITEN OP DE MONITORKAR

- Sluit de kabel van de Brainlab-camera aan op de basis van de **camerakar** en op het achterpaneel van de **monitorkar**.
- Trek voorzichtig aan de aansluiting om te controleren of deze goed vastzit.
- Steek de netstroomkabel in de wandcontactdoos (niet afgebeeld).

**OPMERKING.** Zie de bijbehorende systeemhandleiding voor meer informatie over het aansluiten van de EM-trackingunit.



## CURVE-SYSTEEM AANZETTEN

- Schakel de aan/uit-schakelaar op het gebruikerspaneel van de **monitorkar** ① in.




## CURVE-SYSTEEM UITZETTEN

- Sluit de software af en wacht totdat het ledlampje voor de stroom ① uit gaat.
- Schakel de aan/uit-schakelaar ② uit en wacht tot het ledlampje voor de stroom ③ uit gaat.

**OPMERKING.** Wacht tot het systeem volledig afgesloten is voordat u de aan/uit-schakelaar uitschakelt.

**OPMERKING.** Wacht na het uitschakelen van het **Curve**-systeem minstens 60 seconden voordat u het weer inschakelt.

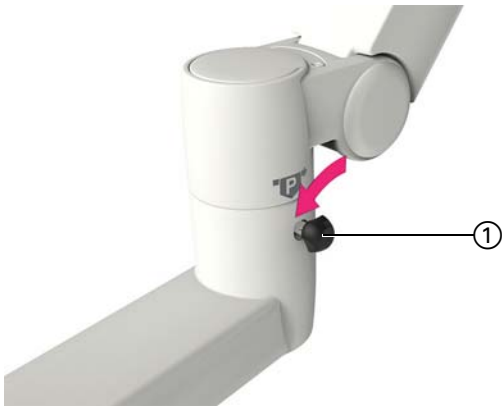

## MONITORSTAND VERGRENDELEN EN ONTGRENDELEN

- Vergrendel elk scharnier door de vergrendelknop ① vast te draaien zodat de monitor niet beweegt als deze wordt aangeraakt.
- Om te ontgrendelen draait u de vergrendelknop ① los totdat het scharnier eenvoudig kan bewegen.



## CAMERA HANDMATIG AFSTELLEN

- Druk op de laserknop aan de achterkant van de camerahandgreep om de positioneringslaser te activeren.
- Met behulp van de laserstraal plaatst u de camera zo, dat het operationeveld zich in het midden van het zichtveld van de camera bevindt.

**OPMERKING.** Instrumenten moeten zich in het zichtveld van de camera bevinden om te kunnen worden gevolgd.




## CAMERA AFSTELLEN MET BEDIENING

- Controleer of de schakelaar van de cameramotoren is ingeschakeld.
- Gebruik de regelknoppen in de software om de camera te verstellen. Er klinkt een piep terwijl de camera beweegt.

# DOCKING EN VERVOER


Hardware: Curve 1.2

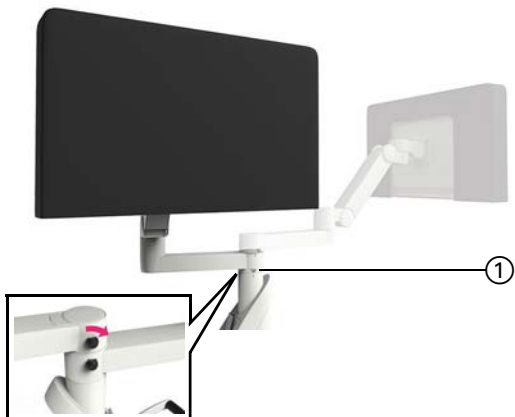

## MONITORKAR POSITIONEREN: STAP 1


- Plaats beschermingshoezen over de monitoren en de camera.
- Draai alle vergrendelknoppen los.
- Draai de onderarm naar de aangegeven stand totdat de parkeersymbolen ① zijn uitgelijnd.
- Draai de vergrendelknop vast (de inzet toont het aanzicht van de andere kant).

**OPMERKING.** Mogelijk moet u de bovenarm uit de weg zetten van de onderarm.

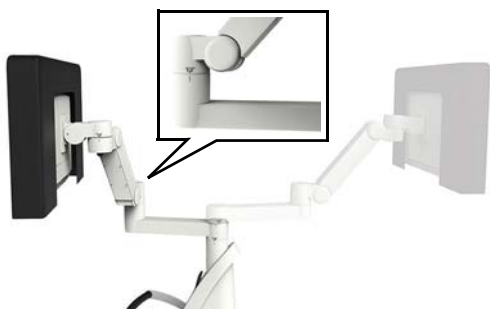

## MONITORKAR POSITIONEREN: STAP 2

- Breng de onderarm zo ver mogelijk omhoog.
- Draai het binnenste scharnier van de onderarm totdat de parkeersymbolen zijn uitgelijnd.
- Draai de vergrendelknop vast.

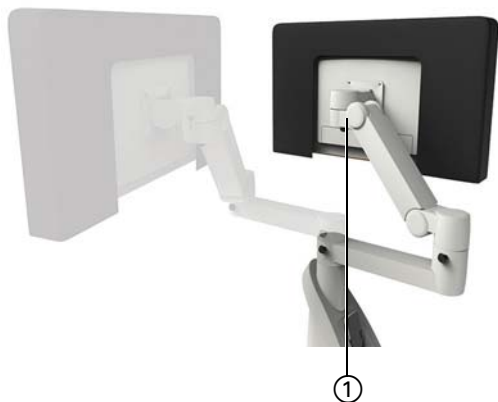

## MONITORKAR POSITIONEREN: STAP 3

- Draai het monitorscharnier ① totdat de parkeersymbolen zijn uitgelijnd.
- Draai de vergrendelknop vast.




## MONITORKAR POSITIONEREN: STAP 4

- Herhaal stap 1 en 2 voor de bovenste arm totdat de **monitorkar** zich in de uiteindelijke positie bevindt.



### CAMERAKAR POSITIONEREN: STAP 1

- Lokaliseer de parkeersymbolen op de camerastandaard. Mogelijk moet u de camera omhoog brengen om het parkeersymbool te kunnen zien.
- Druk op de knop op de handgreep van de telescopische standaard om de standaard in de parkeerstand te zetten.

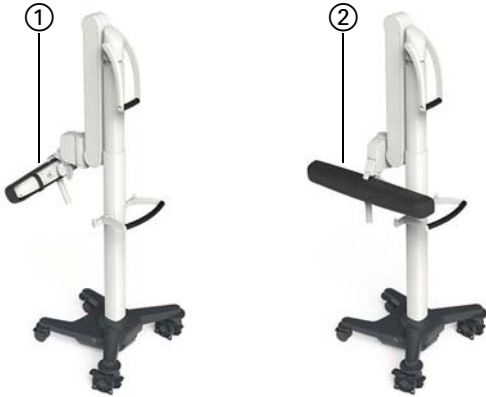


### CAMERAKAR POSITIONEREN: STAP 2

- Vouw de camera-arm omlaag met de camerahandgreep tot de arm stevig is uitgelijnd tegen de standaard ①.
- Draai de camera naar de kant met de handgreep ②.



### CAMERAKAR POSITIONEREN: STAP 3

- Bevestig de camera aan de standaard met het beschermende klittenbandbandje.

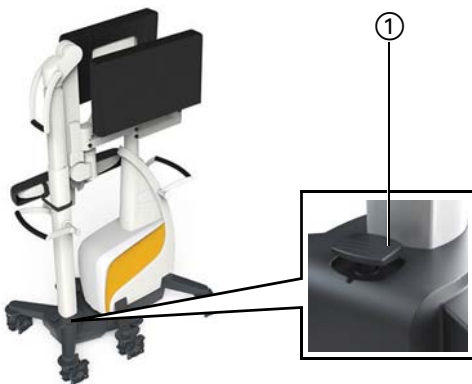

### CURVE-SYSTEEM KOPPELEN EN LOSKOPPELEN VAN DOCKING

- Na het positioneren van de **monitorkar** en de **camerakar** voor docking, schakelt u de remmen van de **monitorkar** in.
- Druk het dockingpedaal in als dit omhoog staat ①.
- Duw de **camerakar** snel in de **monitorkar** totdat het dockingpedaal omhoog springt ①.

Om het geheel weer los te koppelen, drukt u het dockingpedaal in en trekt u de karren uit elkaar.

