

# SISTEMAZIONE DEL SISTEMA CURVE


Hardware: Curve 1.2



## POSIZIONAMENTO IN SALA OPERATORIA

- Posizionare il **carrello della telecamera** a 1,2-1,8 m dal campo operatorio.

**NOTA:** non posizionare alcuna parte della **telecamera** ① e dei **carrelli del monitor** ② direttamente al di sopra del paziente.

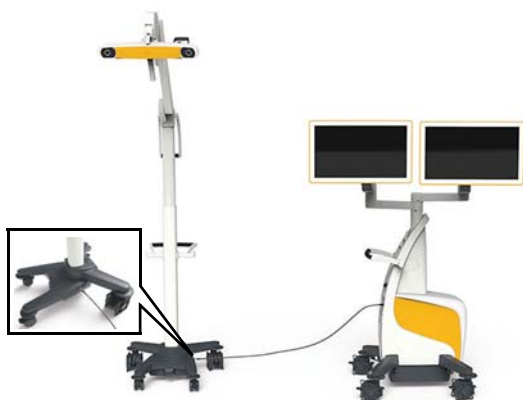

## COLLEGARE IL CARRELLO DELLA TELECAMERA AL CARRELLO DEL MONITOR

- Inserire il cavo della telecamera Brainlab nella base del **carrello della telecamera** e collegarlo al pannello posteriore del **carrello del monitor**.
- Tirare delicatamente il connettore per verificare che sia bloccato.
- Inserire il cavo di alimentazione di rete nella presa a muro (non illustrata).

**NOTA:** per informazioni sul collegamento dell'unità di rilevamento EM, consultare il manuale d'uso del sistema corrispondente.



## ACCENDERE IL SISTEMA CURVE

- Accendere l'interruttore di alimentazione di rete sul pannello dell'utente del **carrello del monitor** ①.




## SPEGNERE IL SISTEMA CURVE

- Uscire dal software e attendere lo spegnimento del LED ① di alimentazione.
- Spegner l'interruttore di alimentazione di rete ② e attendere che il LED ③ di alimentazione di rete si spenga.

**NOTA:** prima di spegnere l'interruttore di alimentazione di rete, attendere che il sistema sia completamente spento.

**NOTA:** dopo avere spento **Curve**, attendere almeno 60 secondi prima di riaccenderlo.

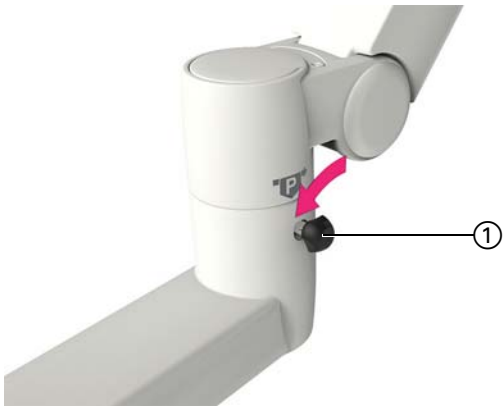

## BLOCCARE E SBLOCCARE LA POSIZIONE DEL MONITOR


- Bloccare ciascun giunto serrando la manopola di blocco ① in modo tale che il monitor non si sposti quando viene toccato.
- Per sbloccarlo, allentare la manopola di blocco ① fino a quando il giunto non si sposta con facilità.



## REGOLARE MANUALMENTE LA TELECAMERA

- Premere il pulsante Laser sulla parte posteriore dell'impugnatura della telecamera per attivare il laser di posizionamento.
- Spostare la telecamera usando il fascio laser in modo tale che il campo operatorio sia al centro del campo visivo della telecamera.

**NOTA:** per essere rilevati, gli strumenti devono trovarsi nel campo visivo della telecamera.

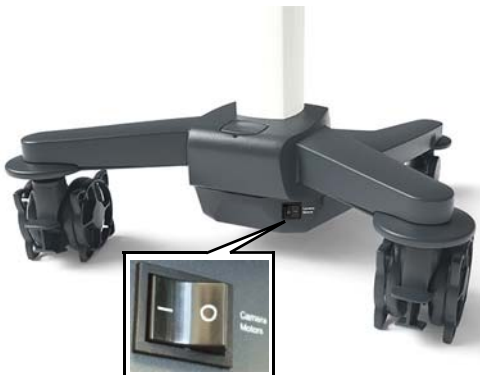


## REGOLARE LA TELECAMERA CON I CONTROLLI

- Assicurarsi che l'interruttore del motore della telecamera sia acceso.
- Per regolare la telecamera usare i comandi software. Mentre la telecamera si muove viene emesso un segnale acustico.

# AGGANCIAMENTO E TRASPORTO


Hardware: Curve 1.2

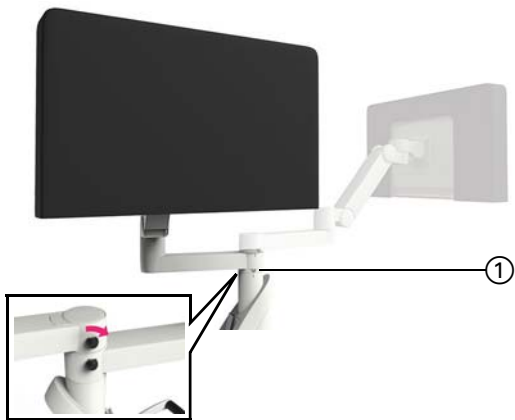

## POSIZIONARE IL CARRELLO DEL MONITOR: PASSAGGIO 1


- Coprire i monitor e la telecamera con le coperture protettive.
- Allentare le manopole di blocco.
- Ruotare il braccio inferiore sulla posizione indicata fino a quando i simboli di parcheggio non si allineano ①.
- Serrare la manopola di blocco (l'insero mostra la vista dall'altro lato).

**NOTA:** potrebbe essere necessario spostare il braccio superiore, allontanandolo dal braccio inferiore.

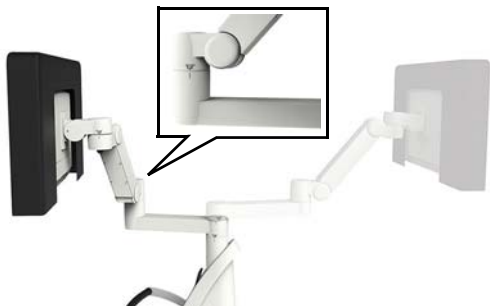

## POSIZIONARE IL CARRELLO DEL MONITOR: PASSAGGIO 2

- Sollevare il braccio inferiore il più in alto possibile.
- Ruotare il giunto interno del braccio inferiore fino a quando i simboli di parcheggio non si allineano.
- Serrare la manopola di blocco.

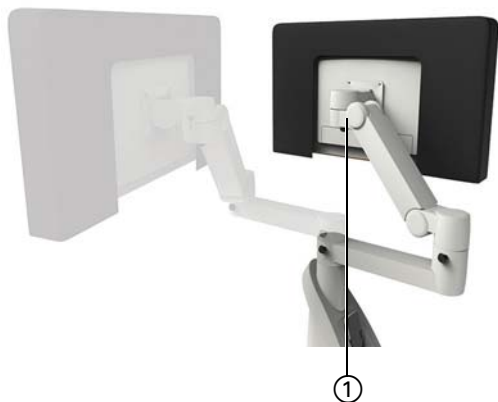

## POSIZIONARE IL CARRELLO DEL MONITOR: PASSAGGIO 3

- Ruotare il giunto del monitor ① fino a quando i simboli di parcheggio non si allineano.
- Serrare la manopola di blocco.



## POSIZIONARE IL CARRELLO DEL MONITOR: PASSAGGIO 4

- Ripetere i passi 1 e 2 per il braccio superiore, fino a quando il **carrello del monitor** non si trova nella sua posizione finale.



### POSIZIONARE IL CARRELLO DELLA TELECAMERA: PASSAGGIO 1

- Individuare il simbolo di parcheggio sul montante della telecamera. Per vedere il simbolo di parcheggio, potrebbe essere necessario sollevare la telecamera.
- Premere il pulsante presente sulla maniglia del montante telescopico per spostare il montante nella posizione di parcheggio.




### POSIZIONARE IL CARRELLO DELLA TELECAMERA: PASSAGGIO 2

- Piegare verso il basso il braccio della telecamera, con l'impugnatura della telecamera stessa, fino a quando non è saldamente allineato con il montante ①.
- Ruotare di lato la telecamera agendo sull'impugnatura ②.



### POSIZIONARE IL CARRELLO DELLA TELECAMERA: PASSAGGIO 3

- Fissare la telecamera sul montante con la chiusura a velcro della copertura protettiva.

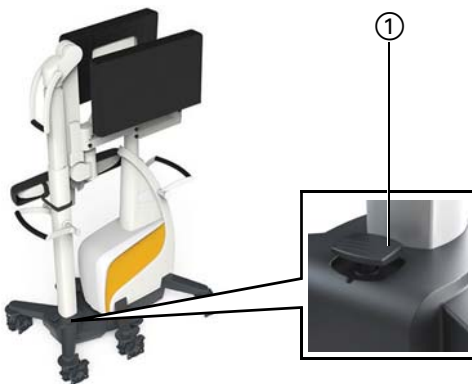

### AGGANCIARE E SGANCIARE CURVE

- Dopo avere posizionato il **carrello del monitor** e il **carrello della telecamera** in modalità di aggancio, inserire i freni del **carrello del monitor**.
- Se è fuoriuscito, spingere verso il basso il pedale di aggancio ①.
- Spingere rapidamente il **carrello della telecamera** nel **carrello del monitor** fino a quando il pedale di aggancio non fuoriesce ①.

Per sbloccare, spingere in basso il pedale di aggancio e tirare.

#### DIRITTI D'AUTORE:

Questa guida contiene informazioni proprietarie protette dalla legge sui diritti d'autore. Ne sono vietate la riproduzione o traduzione, del tutto o in parte, senza un'espressa autorizzazione scritta da parte di Brainlab.

Revisione del documento: 1.0

Numero di articolo: 60917-351T

#### OBBLIGHI:

Il presente manuale è soggetto a modifiche senza preavviso e non costituisce un impegno da parte di Brainlab.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Limitazioni di responsabilità" dei Termini e condizioni generali di vendita Brainlab.

