



MONTAGEM DO VARIOGUIDE

Hardware: VarioGuide

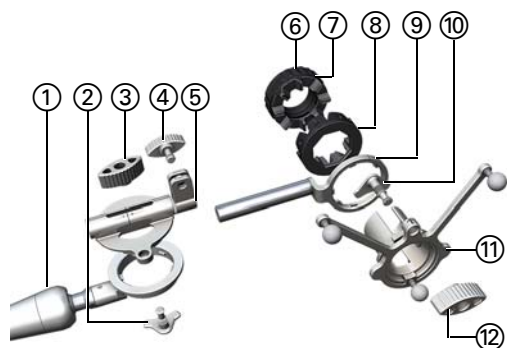

COMPONENTES DO VARIOGUIDE


- ① Braço
- ② Trava da **Junta 1** (Joint 1), ③ Parafuso da **Junta 1**,
- ④ Parafuso da **Junta 2** (Joint 2)
- ⑤ Junta do disco
- ⑥ Disco externo, ⑦ Anel da trava, ⑧ Disco interno
- ⑨ Suporte da estrela de rastreamento
- ⑩ Trava da **Junta 3** (Joint 3)
- ⑪ Estrela de rastreamento
- ⑫ Parafuso da **Junta 3**

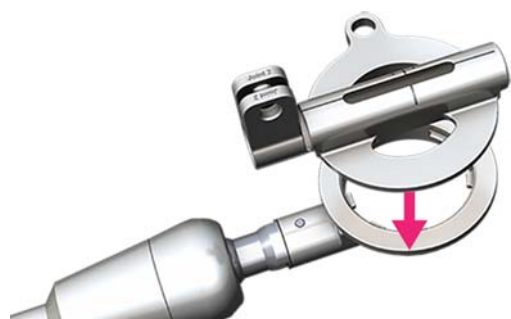

ETAPA 1

- Coloque a junta do disco no anel do braço do **VarioGuide**.
- Certifique-se de coincidir os dentes do anel com as endentações da junta do disco.

OBSERVAÇÃO: uma única orientação é permitida (conforme mostrado).

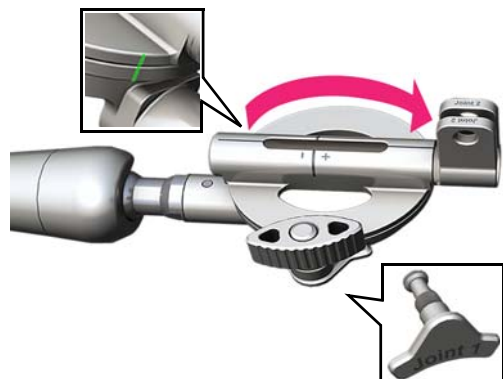


ETAPA 2

- Gire a junta do disco em 180° para a posição mostrada, de forma que as duas linhas fiquem alinhadas.
- Insira a trava da **Junta 1** e posicione a trava de forma que se ajuste no anel do braço do **VarioGuide**.
- Prenda a **Junta 1**, apertando o parafuso no sentido horário.




ETAPA 3

- Insira o parafuso da **Junta 2** parcialmente na junta do disco.
- Parafuse o suporte da estrela de rastreamento, até o ponto em que seja possível deslizá-lo livremente pela parte inferior da junta do disco.

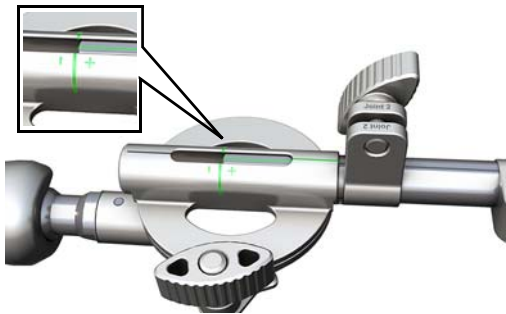

ETAPA 4

- Deslize o suporte da estrela de rastreamento na junta do disco, até que as linhas dos dois componentes fiquem alinhadas.
- Aperte o parafuso da **Junta 2**, para prender o suporte da estrela de rastreamento na junta do disco.

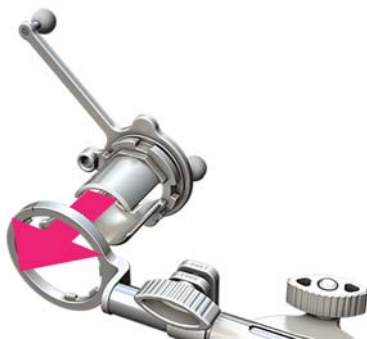


ETAPA 5

- Coloque a estrela do **VarioGuide** no suporte da estrela de rastreamento.


Certifique-se de coincidir os dentes do anel do suporte de estrela de rastreamento com as endentações da estrela.

OBSERVAÇÃO: uma única orientação é permitida (conforme mostrado).

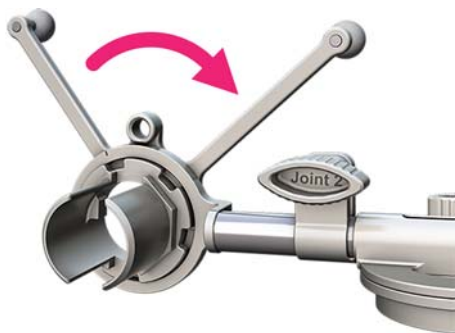

ETAPA 6

- Gire a estrela do **VarioGuide** em 90°, conforme mostrado.

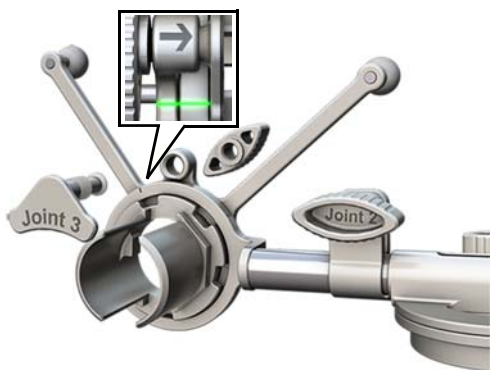

ETAPA 7

- Insira a trava da **Junta 3** e posicione a trava de forma que se ajuste no anel do suporte de estrela de rastreamento.
- Faça o ajuste necessário para alinhar as linhas nos dois componentes.
- Prenda a **Junta 3**, apertando o parafuso no sentido horário.

MONTAGEM DO VARIOGUIDE

Hardware: VarioGuide



ETAPA 8

- Selecione o conjunto de disco que tenha o diâmetro requerido.
- Coloque o disco interno na estrela do **VarioGuide**.
- Alinhe o diâmetro requerido no disco interno à a seta na estrela.
- Pressione o disco interno até que trave na posição adequada.



ETAPA 9

- Monte o anel da trava ① no disco externo ②.
- Alinhe a linha do anel da trava à linha do disco interno.



ETAPA 10

- Parafuse a trava do anel em sua posição.



ETAPA 11

- O **VarioGuide** montado está agora na posição inicial. O **VarioGuide** pode agora ser acoplado ao suporte de cabeça ou ao Adaptador em V (na posição do braço esquerdo ou do braço direito).



Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Germany

Europa, África, Ásia e Austrália: +49 89 99 15 68 44
Estados Unidos e Canadá: +1 800 597 5911
Japão: +81 3 3769 6900
Brasil: 0800 892 1217
França: +33-800-67-60-30

E-mail: support@brainlab.com

DIREITOS AUTORAIS:

Este manual contém informações proprietárias, protegidas por direitos autorais. Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida ou traduzida sem a permissão expressa, por escrito, da Brainlab.

Revisão do Documento: 1.1

Número do Artigo: 60903-42BP

RESPONSABILIDADE:

Este manual está sujeito a alterações sem aviso prévio e não representa um compromisso por parte da Brainlab.

Para obter informações adicionais, consulte a seção "Limitações de Responsabilidade", no documento Termos e Condições de Vendas Padrão da Brainlab.

