

防病毒和 Windows Update 策略

中文

基本信息

警告

为了确保 Brainlab 系统按计划持续运行并且一直符合 CE 认证和/或 FDA 审批的要求，Brainlab 建议您遵循这些关于 Windows 更新和防病毒软件的指导原则。本策略适用于：

- Brainlab 计划系统（在患者治疗期间不使用）
- Brainlab 导航和摆位系统（在患者治疗期间使用）

Windows 更新

默认情况下，Brainlab 系统通过本地组策略设置进行配置。如果您的组织在任何安装了 Brainlab 软件的服务器上使用 Windows 组策略设置，切勿更改该配置。

仅安装 Microsoft 安全更新；允许使用**每月汇总和仅安全更新**。不得安装服务包和可选更新。医疗器械法规要求服务包应由医疗器械制造商测试和发布。如果您将 Brainlab 系统添加到医院域，请确保下列设置有效。

不得在治疗患者期间安装更新。

驱动程序更新

不得在 Brainlab 平台上更新驱动程序。

不得在 Brainlab 平台上使用手动安装或 Windows 更新来更新驱动程序。此策略通过不允许更改的组策略设置得以保证。

防病毒

Brainlab 建议使用最先进的防病毒软件保护系统。首次安装防病毒软件后，必须由 Brainlab 服务工程师来验证系统性能。请注意，某些恶意软件防护软件（例如病毒扫描程序）设置可能会降低系统性能。例如，如果执行实时扫描并监控对每个文件的访问，则对患者数据的访问可能会受到限制。为了获得最佳结果：

- 禁用任何额外的防病毒软件功能（例如，浏览器或电子邮件扫描程序、其他防火墙等）。
- 禁用防病毒软件弹出消息。

配置防病毒软件以确保其不会扫描或修改以下路径下的文件（即，添加例外文件夹）：

- C:\Brainlab、D:\Brainlab 和 F:\Brainlab 等
- C:\PatientData、D:\PatientData 和 F:\PatientData 等

对于计划系统（iPlan RT 安装除外）：永久激活访问时/实时扫描并正确地设置此处所列的例外文件夹。

对于 iPlan RT 安装以及导航和摆位系统：禁用访问时/实时扫描。安排在系统关闭时或非临床时间内执行按需/预定扫描。

更多信息



本策略取代所有以往及现有的产品文档。有关更多信息，请联系 Brainlab 客户支持人员。

使用下面的登录信息查看关于 Windows 更新、驱动程序更新、服务器的组策略设置、防病毒软件和特定漏洞以及 Brainlab 支持部门所阻止的 Microsoft 安全更新的信息。

地址：<https://www.brainlab.com/updates>

密码：WindowsUpdates!89

符号

	警告
	制造商

