

Ligne de conduite relative aux antivirus et aux mises à jour de Windows

FRANÇAIS

Informations générales

Avertissement

Afin de garantir le bon fonctionnement de votre système Brainlab et sa conformité à la certification CE et/ou aux exigences de la FDA, Brainlab vous recommande de respecter les consignes suivantes concernant les logiciels antivirus et les mises à jour de Windows. Cette ligne de conduite s'applique aux éléments suivants :

- Systèmes de planification Brainlab (non utilisés pendant le traitement du patient)
- Systèmes de navigation et de positionnement Brainlab (utilisés pendant le traitement du patient)

Mises à jour Windows

Par défaut, les systèmes Brainlab sont configurés via les paramètres de stratégie de groupe. Si votre établissement utilise les paramètres de stratégie de groupe Windows sur un serveur sur lequel sont installés les logiciels Brainlab, ne modifiez en rien la configuration.

Installez uniquement les mises à jour de sécurité du système d'exploitation Microsoft : les **mises à jour cumulatives mensuelles** et les **mises à jour de sécurité uniquement** sont autorisées. N'installez aucun Service Pack ni aucune mise à jour facultative. Conformément à la réglementation en matière de dispositifs médicaux, les Service Packs doivent être testés et commercialisés par le fabricant du dispositif médical. Si vous ajoutez le système Brainlab au domaine de l'établissement, veillez à appliquer les paramètres suivants.

N'installez pas de mises à jour pendant le traitement d'un patient.

Mises à jour des pilotes

Ne mettez pas les pilotes à jour sur les plates-formes Brainlab.

N'utilisez pas la configuration manuelle ni les Windows Updates (Mises à jour Windows) pour mettre à jour les pilotes sur les plates-formes Brainlab. Cette ligne de conduite est garantie par les paramètres de stratégie de groupe qui ne doivent pas être modifiés.

Antivirus

Brainlab recommande de protéger le système avec un logiciel antivirus ultraperformant. Les performances du système doivent être vérifiées par un ingénieur support de Brainlab après la première installation d'un logiciel antivirus. N'oubliez pas que les paramètres de certains logiciels de protection contre les programmes malveillants (p. ex. antivirus) peuvent compromettre les performances du système. À titre d'exemple, si vous lancez des analyses en temps réel et contrôlez l'accès à chaque fichier, cela peut restreindre l'accès aux données du patient. Pour des résultats optimaux :

- Désactivez les fonctionnalités supplémentaires du logiciel antivirus (p. ex. analyse du navigateur ou des e-mails, pare-feu supplémentaire).
- Désactivez les messages contextuels du logiciel antivirus.

Configurez le logiciel antivirus (p. ex. en ajoutant des exceptions pour dossiers) de sorte qu'il n'analyse pas, ni ne modifie les éléments suivants :

- C:\Brainlab, D:\Brainlab et F:\Brainlab, etc.
- C:\PatientData, D:\PatientData et F:\PatientData, etc.

Pour les systèmes de planification (sauf les installations d'iPlan RT) : activez de façon permanente les analyses à l'accès/en temps réel en définissant correctement les exceptions pour dossiers indiqués ici.

Pour les installations d'iPlan RT et les systèmes de navigation et de positionnement : désactivez les analyses à l'accès/en temps réel. Programmez l'exécution des analyses à la demande/planifiées à l'arrêt du système ou en dehors des heures de travail.

Informations complémentaires

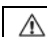

Cette ligne de conduite remplace tout document relatif au produit antérieur et actuel. Pour plus d'informations, contactez le support technique de Brainlab.

Utilisez les informations de connexion ci-dessous pour consulter les informations relatives aux Mises à jour Windows, Mises à jour des pilotes, paramètres Stratégie de groupe pour les serveurs, logiciels antivirus et bogues spécifiques ainsi qu'une liste des mises à jour de sécurité Microsoft bloquées par le support technique de Brainlab.

Adresse : <https://www.brainlab.com/updates>

Mot de passe : WindowsUpdates!89

Symboles

| | |
|---|---------------|
|  | Avertissement |
|  | Fabricant |

