

# Politica de actualizare a programelor antivirus și a sistemului de operare Windows

## ROMÂNĂ

### Informații generale

#### Avertisment

Pentru a asigura funcționarea permanentă a sistemului Brainlab conform destinației vizate și pentru a rămâne în conformitate cu certificarea CE și cu aprobarea FDA, Brainlab vă recomandă să urmați instrucțiunile de mai jos pentru actualizarea programelor antivirus și a sistemului de operare Windows. Această politică se aplică:

- Sistemelor de planificare Brainlab (care nu sunt utilizate în timpul tratamentului pacientului)
- Sistemelor de navigare și poziționare Brainlab (care sunt utilizate în timpul tratamentului pacientului)

### Actualizări ale sistemului de operare Windows

Sistemele Brainlab sunt configurate în mod implicit prin setări locale ale politicilor de grup. Nu modificați configurația dacă organizația dumneavoastră utilizează setările politicii de grup Windows pe orice servere pe care este instalat software-ul Brainlab.

Instalați doar actualizările de securitate Microsoft; **Actualizările lunare cumulative și cele exclusiv legate de securitate** sunt permise. Nu instalați pachete Service Pack sau actualizări opționale. Regulamentele privind dispozitivele medicale prevăd testarea și lansarea pachetelor Service Pack de către producătorul dispozitivului medical. Dacă adăugați sistemul Brainlab la domeniul spitalului, asigurați-vă că următoarele setări sunt activate.

Nu instalați actualizările în timpul tratamentului pacientului.

### Actualizări ale software-ului pentru drivere

Nu actualizați driverele pe platformele Brainlab.

Nu utilizați configurarea manuală sau actualizările Windows pentru actualizarea driverelor de pe platformele Brainlab. Această politică este garantată de următoarele setări ale politicilor de grup care nu trebuie modificate.

### Antivirus

Brainlab recomandă protejarea sistemului cu software antivirus de ultimă oră. Performanța sistemului trebuie verificată de către un inginer de service Brainlab după instalarea primului software antivirus. Rețineți că unele setări ale software-ului de protecție malware (de exemplu, scanner antivirus) pot afecta negativ performanța sistemului. De exemplu, dacă se realizează scanări în timp real, iar accesul fiecărui fișier este monitorizat, atunci accesul la datele pacientului poate fi restricționat. Pentru rezultate optime:

- Dezactivați orice caracteristici suplimentare ale software-ului antivirus (de exemplu, browser sau scanere de e-mail, firewall suplimentar).
- Dezactivați mesajele pop-up ale software-ului antivirus.

Configurați software-ul antivirus (de exemplu, prin adăugarea la folderul de excepții) astfel încât să nu scaneze sau să modifice următoarele:

- C:\Brainlab, D:\Brainlab și F:\Brainlab etc.
- C:\PatientData, D:\PatientData și F:\PatientData etc.

*Pentru Sistemele de planificare (cu excepția instalațiilor iPlan RT):* Activați permanent scanările la acces/în timp real cu excepțiile din folder indicate aici configurate corect.

*Pentru instalațiile iPlan RT și sistemele de navigare și poziționare:* Dezactivați scanările la acces/în timp real. Programați ca scanările la cerere/în timp real să fie realizate la oprirea sistemului sau în afara programului de lucru.

### Mai multe informații

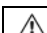
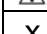
Această politică înlocuiește toate documentele despre produs din trecut și prezent. Pentru informații suplimentare, contactați departamentul de relații cu clienții de la Brainlab.

Utilizați informațiile de conectare de mai jos pentru a vizualiza informații despre actualizările Windows, actualizările software-ului pentru drivere, setările politicilor de grup pentru servere, software-ul antivirus și erorile specifice, precum și o listă a actualizărilor de securitate Microsoft blocate de serviciul de asistență clienți Brainlab.

Adresa: <https://www.brainlab.com/updates>

Parola: WindowsUpdates!89

### Simboluri

	Avertisment
	Producător

