

„Patient Data Manager“ ir „iPlan“ suderinamumas

„Patient Data Manager“ ir „iPlan“ suderinamumas

Senesnės **Patient Data Manager** (ankstesnės nei 2.6 versija) versijos yra nesuderinamos su konkrečiomis **iPlan** versijomis ir jų negalima naudoti kartu, nes **iPlan** taikyti objekto pakeitimai nerodomi eksportavus į DICOM.

Papildomos informacijos rasite 2019 m. spalio 8 d. praktiniame saugos įspėjime / pranešime apie gaminį („Brainlab“ identifikatorius CAPA-20190904-002337).

Paveikti deriniai

Jeigu norite naudoti bet kurią išvardytą **Patient Data Manager** versiją su bet kuriomis išvardytomis **iPlan** versijomis, kreipkitės į „Brainlab“ pagalbos tarnybą ir paprašykite **Patient Data Manager** programinės įrangos naujinio.

Programinės įrangos versijos	
„Patient Data Manager“	2.1.1, 2.2.0, 2.2.1, 2.3.0, 2.3.1, 2.4.0, 2.5.0, 2.5.1
„iPlan CMF“	3.0.5, 3.0.6
„iPlan Cranial“	3.0.5, 3.0.6
„iPlan ENT“	3.0.5, 3.0.6
„iPlan Spine“	3.0.5, 3.0.6

Paaiškinimas

Jeigu jūsų įstaigoje yra abi priemonės, bet užtikrinama, kad jos nėra ir nebus naudojami kartu (pvz., nurodyta **Patient Data Manager** versija yra tik RT skyriuje, o nurodyta **iPlan** versija yra tik ne RT skyriuje), **Patient Data Manager** programinės įrangos naujinys nereikalingas.

